



## Einige Screen Shorts : Gets Adapter V2 : « Easy-Care-Visi-Log » :

### Hauptzugang per Webbrowser:

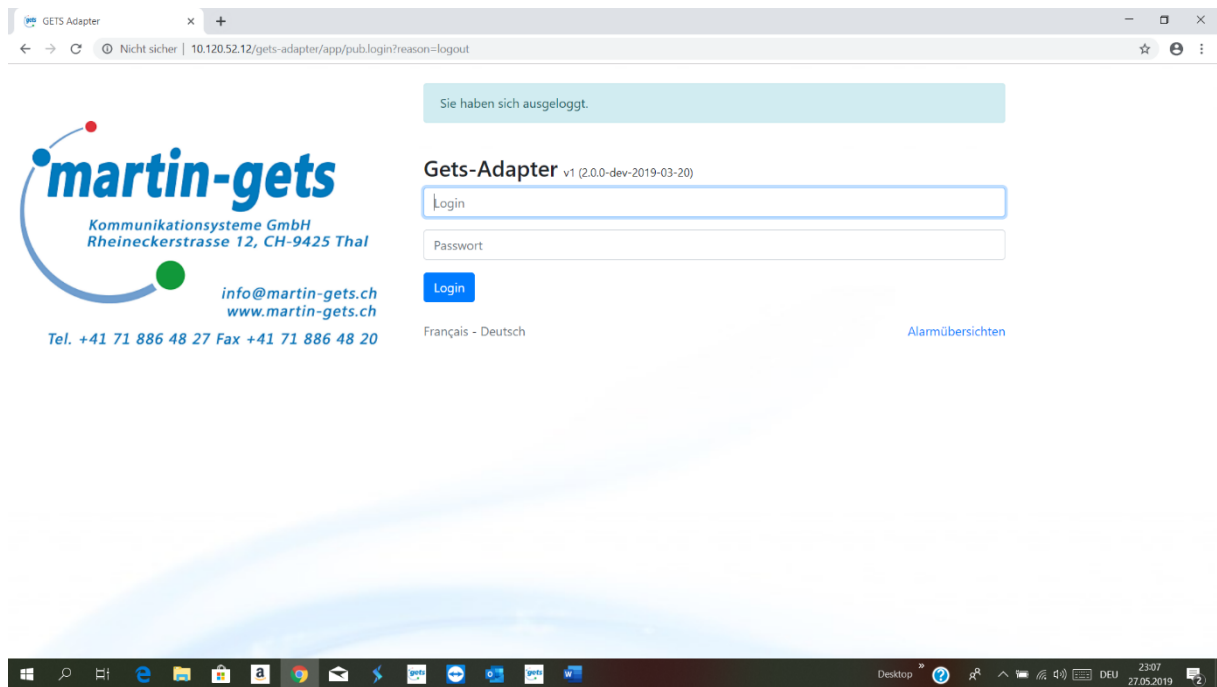


## Verwaltung Interface 3000MCPE :

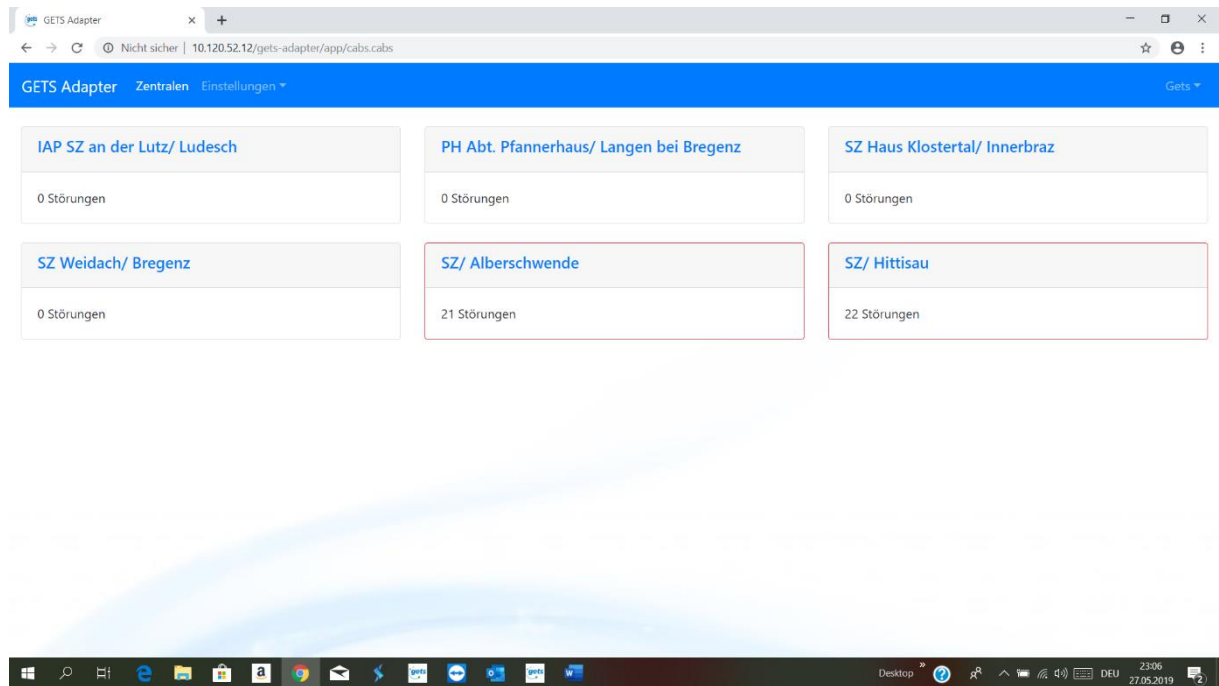

GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Location	Status
IAP SZ an der Lutz/ Ludesch	0 Störungen
PH Abt. Pfannerhaus/ Langen bei Bregenz	0 Störungen
SZ Haus Klostertal/ Innerbranz	0 Störungen
SZ Weidach/ Bregenz	0 Störungen
SZ/ Alberschwende	21 Störungen
SZ/ Hittisau	22 Störungen

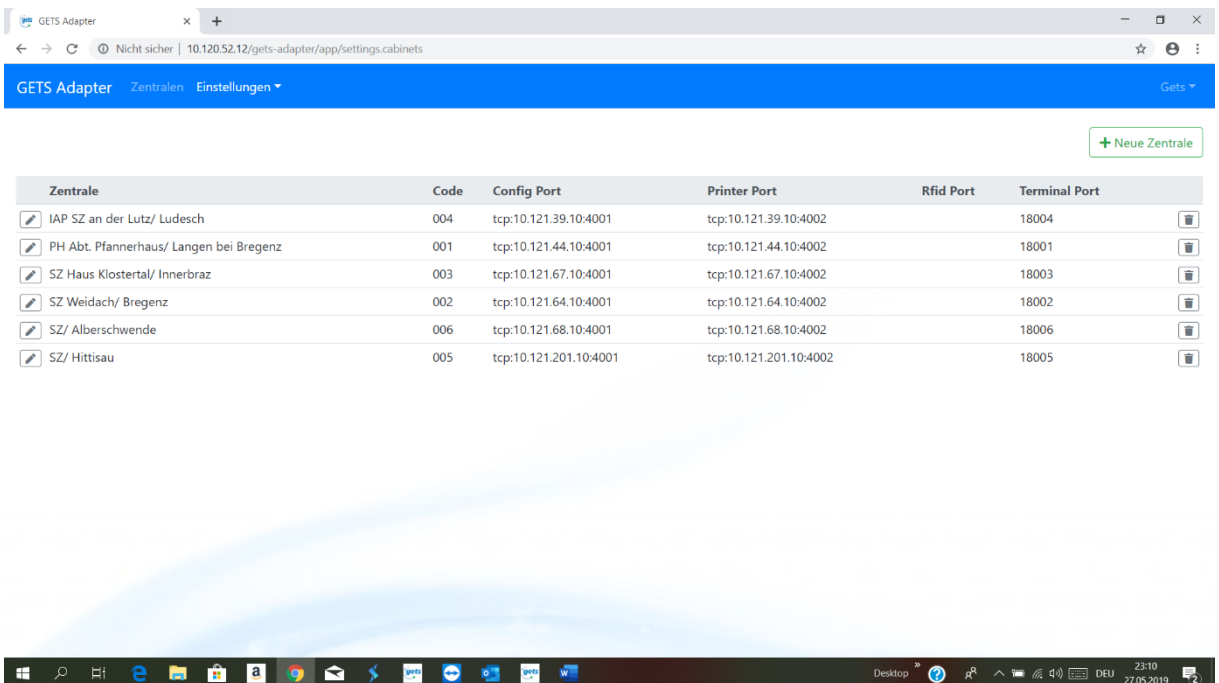

GETS Adapter Zentralen Einstellungen

[+ Neue Zentrale](#)

Zentrale	Code	Config Port	Printer Port	Rfid Port	Terminal Port
IAP SZ an der Lutz/ Ludesch	004	tcp:10.121.39.10:4001	tcp:10.121.39.10:4002		18004
PH Abt. Pfannerhaus/ Langen bei Bregenz	001	tcp:10.121.44.10:4001	tcp:10.121.44.10:4002		18001
SZ Haus Klostertal/ Innerbranz	003	tcp:10.121.67.10:4001	tcp:10.121.67.10:4002		18003
SZ Weidach/ Bregenz	002	tcp:10.121.64.10:4001	tcp:10.121.64.10:4002		18002
SZ/ Alberschwende	006	tcp:10.121.68.10:4001	tcp:10.121.68.10:4002		18006
SZ/ Hittisau	005	tcp:10.121.201.10:4001	tcp:10.121.201.10:4002		18005

## Verwaltung verkabeltes Patiententrufsystem:

GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Suche:  Status: Alle Überwacht: Alle

Zimmer	Adresse	Name	Beschreibung	Sektor	Status	Überwacht
Medaillons	57	RES	Mob. Ruf	1 - Wohngruppe 1/ EG	Inaktiv	Nicht überwacht
Beschreibungen	110	4BAD	BAD	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Aktiv	Nicht überwacht
Alarme	111	104	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
Störungen	112	1AUF	Aufent.	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
Displays	113	1DZ	DZ	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
Sektoren	114	101	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
Benutzerprot.	115	102	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
Backups	116	103	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
Druckerprot.	117	XXXX	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Inaktiv	Nicht überwacht
Personen	118	105	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
Alarmübers.	119	106	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
	120	107	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
	121	108	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
	122	1AUF	Aufent.	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
	123	109	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht
	124	110	Zimmer	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	Nicht überwacht

GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Name:

Sektor:


Beschreibung:

Status:

Überwachung:


Diese Aktion wird protokolliert. Bitte geben Sie dazu ihren Namen an.

## Anzeige Visualisierung von Störungen -> Einfache Verwaltung:

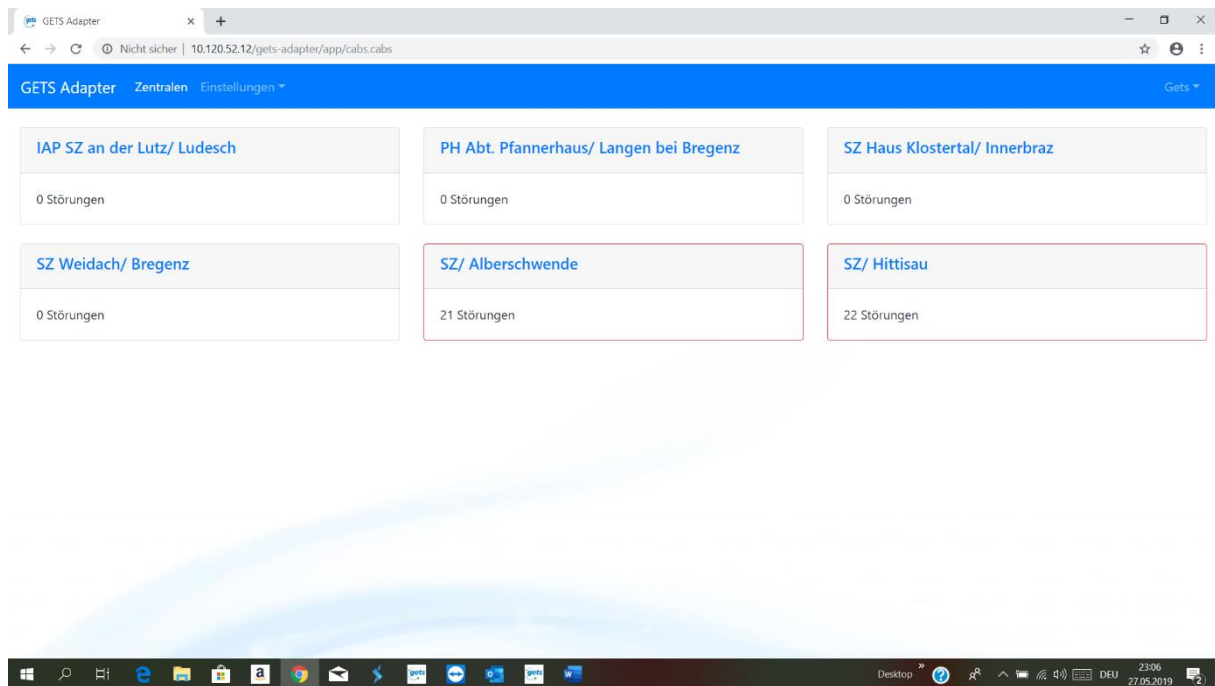


GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Location	Störungen
IAP SZ an der Lutz/ Ludesch	0 Störungen
PH Abt. Pfannerhaus/ Langen bei Bregenz	0 Störungen
SZ Haus Klostersal/ Innerbraz	0 Störungen
SZ Weidach/ Bregenz	0 Störungen
SZ/ Alberschwende	21 Störungen
SZ/ Hittisau	22 Störungen

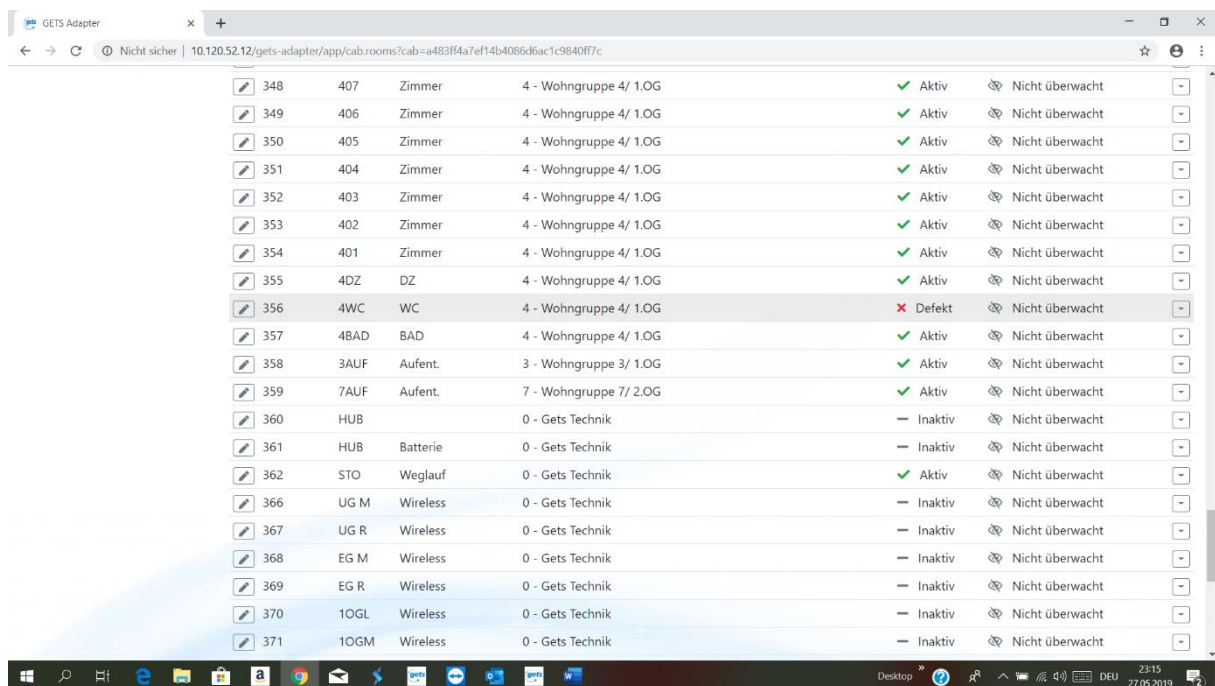

ID	Room	Room Name	Room Group	Status	Alarm
348	407	Zimmer	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
349	406	Zimmer	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
350	405	Zimmer	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
351	404	Zimmer	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
352	403	Zimmer	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
353	402	Zimmer	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
354	401	Zimmer	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
355	4DZ	DZ	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
356	4WC	WC	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✗ Defekt	Nicht überwacht
357	4BAD	BAD	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
358	3AUF	Aufent.	3 - Wohngruppe 3/ 1.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
359	7AUF	Aufent.	7 - Wohngruppe 7/ 2.OG	✓ Aktiv	Nicht überwacht
360	HUB		0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht
361	HUB	Batterie	0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht
362	STO	Weglauf	0 - Gets Technik	✓ Aktiv	Nicht überwacht
366	UG M	Wireless	0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht
367	UG R	Wireless	0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht
368	EG M	Wireless	0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht
369	EG R	Wireless	0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht
370	1OGL	Wireless	0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht
371	1OGM	Wireless	0 - Gets Technik	— Inaktiv	Nicht überwacht

## Verwaltung Drahtlosruf- Weglaufschutz über Interface 3000MCPE:

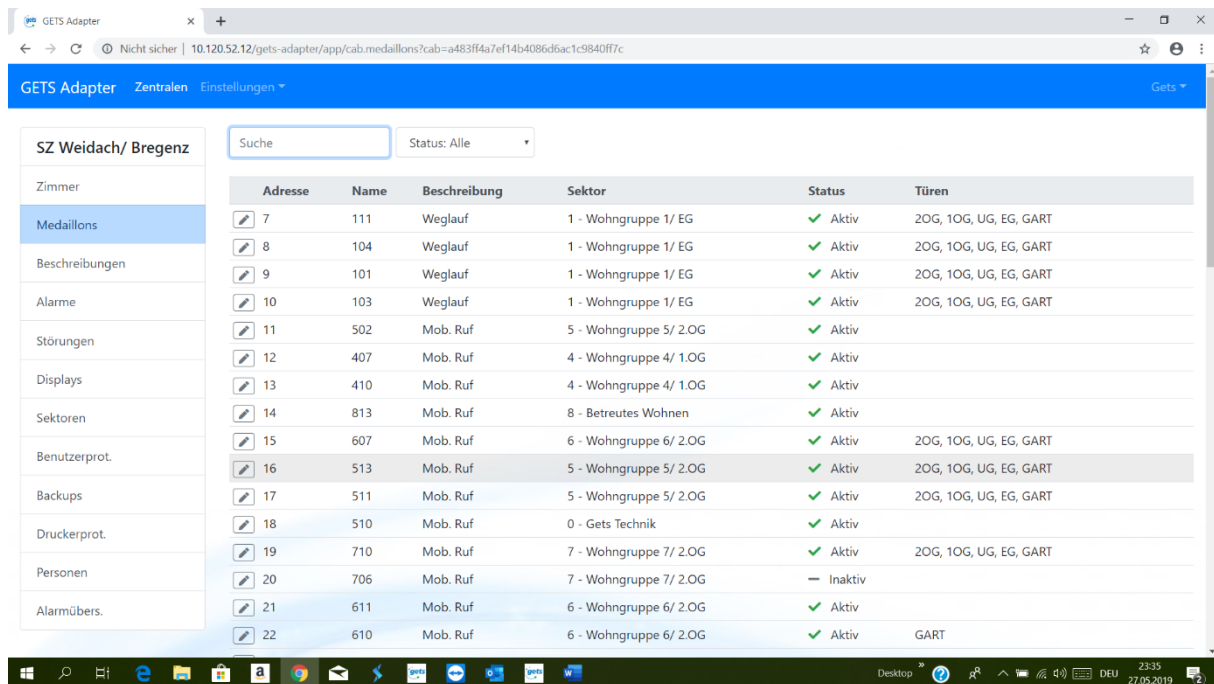


GETS Adapter Zentralen Einstellungen

SZ Weidach/ Bregenz

Suche: Status: Alle

Adresse	Name	Beschreibung	Sektor	Status	Türen
7	111	Weglauf	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
8	104	Weglauf	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
9	101	Weglauf	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
10	103	Weglauf	1 - Wohngruppe 1/ EG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
11	502	Mob. Ruf	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Aktiv	
12	407	Mob. Ruf	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Aktiv	
13	410	Mob. Ruf	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Aktiv	
14	813	Mob. Ruf	8 - Betreutes Wohnen	Aktiv	
15	607	Mob. Ruf	6 - Wohngruppe 6/ 2.OG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
16	513	Mob. Ruf	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
17	511	Mob. Ruf	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
18	510	Mob. Ruf	0 - Gets Technik	Aktiv	
19	710	Mob. Ruf	7 - Wohngruppe 7/ 2.OG	Aktiv	2OG, 1OG, UG, EG, GART
20	706	Mob. Ruf	7 - Wohngruppe 7/ 2.OG	Inaktiv	
21	611	Mob. Ruf	6 - Wohngruppe 6/ 2.OG	Aktiv	
22	610	Mob. Ruf	6 - Wohngruppe 6/ 2.OG	Aktiv	GART

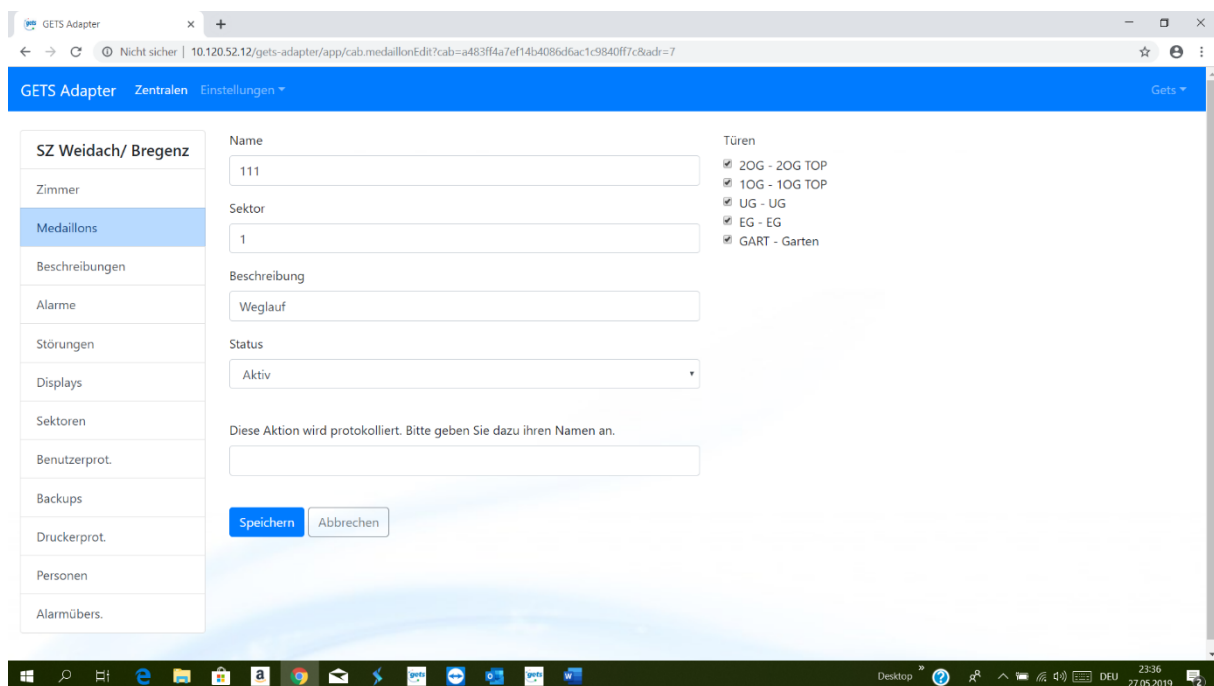

GETS Adapter Zentralen Einstellungen

SZ Weidach/ Bregenz

Name: 111

Sektor: 1

Beschreibung: Weglauf

Status: Aktiv

Türen:
 

- ☒ 2OG - 2OG TOP
- ☒ 1OG - 1OG TOP
- ☒ UG - UG
- ☒ EG - EG
- ☒ GART - Garten

Diese Aktion wird protokolliert. Bitte geben Sie dazu ihren Namen an.

Speichern Abbrechen

## Protokollierung Verwaltung -> Auswertung- Bearbeitung:

GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Suche Zeige 200 von 2972

Export Archiv

Datum	Zimmer	Bett	Sektor	Keyword	Anwesend	Erledigt	Person
27.05.2019 23:13	610	----	6 - Wohngruppe 6/ 2.OG	Anwesenheit	27.05.2019 23:13	27.05.2019 23:14	
27.05.2019 23:09	401	----	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 23:09	27.05.2019 23:09	
27.05.2019 23:08	403	----	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 23:08	27.05.2019 23:08	
27.05.2019 22:58	201	----	2 - Wohngruppe 2/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:58	27.05.2019 23:01	
27.05.2019 22:46	111	----	1 - Wohngruppe 1/ EG	Anwesenheit	27.05.2019 22:46	27.05.2019 22:47	
27.05.2019 22:45	111	-D--	1 - Wohngruppe 1/ EG	Normalruf		27.05.2019 22:46	
27.05.2019 22:21	108	----	1 - Wohngruppe 1/ EG	Anwesenheit	27.05.2019 22:21	27.05.2019 22:22	
27.05.2019 22:18	409	----	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:18	27.05.2019 22:23	
27.05.2019 22:13	210	----	2 - Wohngruppe 2/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:13	27.05.2019 22:14	
27.05.2019 22:09	509	----	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Normalruf		27.05.2019 22:10	
27.05.2019 22:07	405	----	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:07	27.05.2019 22:09	
27.05.2019 22:06	406	----	4 - Wohngruppe 4/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:06	27.05.2019 22:07	
27.05.2019 22:03	306	----	3 - Wohngruppe 3/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:03	27.05.2019 22:05	
27.05.2019 22:02	306	----	3 - Wohngruppe 3/ 1.OG	Normalruf		27.05.2019 22:03	
27.05.2019 22:02	309	----	3 - Wohngruppe 3/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:02	27.05.2019 22:02	
27.05.2019 22:00	310	----	3 - Wohngruppe 3/ 1.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:00	27.05.2019 22:02	
27.05.2019 22:00	513	----	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Anwesenheit	27.05.2019 22:00		

GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Notruf X Zeige 200 von 2973

Export Archiv

Datum	Zimmer	Bett	Sektor	Keyword	Anwesend	Erledigt	Person
27.05.2019 20:26	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 20:27	
27.05.2019 20:07	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 20:08	
27.05.2019 19:50	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 19:51	
27.05.2019 19:43	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 19:43	
27.05.2019 19:30	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 19:30	
27.05.2019 19:17	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 19:18	
27.05.2019 19:08	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 19:08	
27.05.2019 18:23	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 18:23	
27.05.2019 18:16	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 18:16	
27.05.2019 18:05	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 18:06	
27.05.2019 17:53	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 17:53	
27.05.2019 17:47	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 17:47	
27.05.2019 17:25	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 17:25	
27.05.2019 17:17	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 17:18	
27.05.2019 17:10	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 17:10	
27.05.2019 17:05	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 17:06	
27.05.2019 16:59	TURE	----	9 - Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG	Notruf		27.05.2019 17:00	


GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Fugue X Zeige 6 von 2974

Export Archiv


Datum	Zimmer	Bett	Sektor	Keyword	Anwesend	Erledigt	Person
27.05.2019 15:22	513	----	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Fugue		27.05.2019 15:28	
27.05.2019 15:19	305	----	3 - Wohngruppe 3/ 1.OG	Fugue		27.05.2019 15:20	
27.05.2019 15:18	305	----	3 - Wohngruppe 3/ 1.OG	Fugue		27.05.2019 15:18	
27.05.2019 11:54	601	----	6 - Wohngruppe 6/ 2.OG	Fugue		27.05.2019 11:55	
26.05.2019 13:57	501	----	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Fugue		26.05.2019 13:57	
26.05.2019 07:54	505	----	5 - Wohngruppe 5/ 2.OG	Fugue		26.05.2019 07:55	

## Tägliche Printlog`s der letzten 30 Tage:

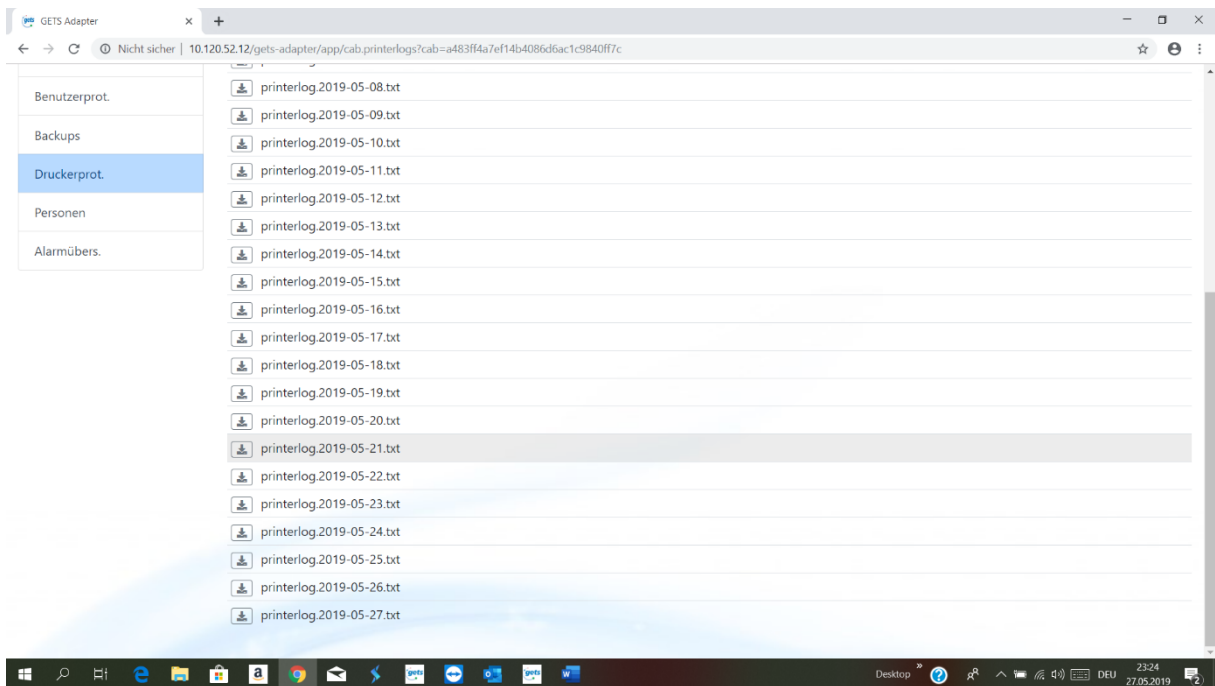

The screenshot shows the 'Druckerprot.' (Printer Logs) section of the GETS Adapter interface. A sidebar on the left contains navigation links: Benutzerprot., Backups, Druckerprot. (selected), Personen, and Alarmübers. The main area displays a list of 30 daily printer log files, each with a download icon and a filename starting with 'printerlog.2019-05-'. The files are listed from May 8th to May 27th, 2019. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 23:24 on 27.05.2019.


## Automatisiertes Backup von Einstellungen Interface 3000MCE:

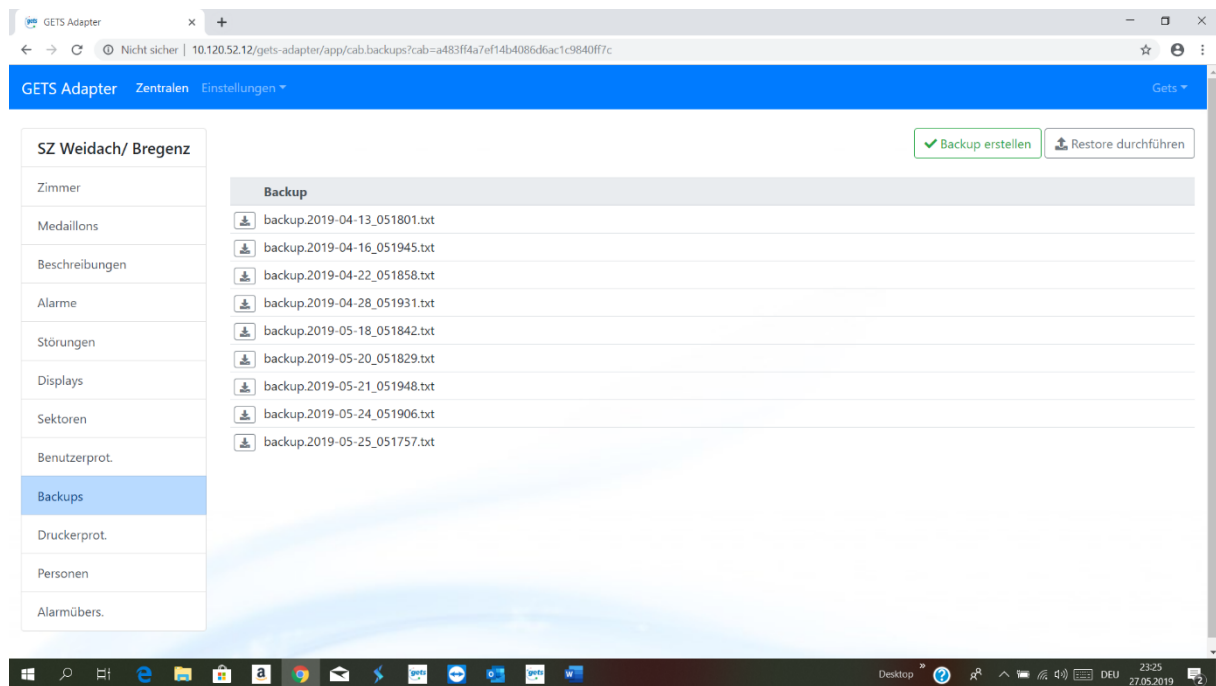

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) section of the GETS Adapter interface, specifically the 'Backups' tab. The sidebar on the left lists various settings categories, with 'Backups' selected. The main area displays a list of automated backup files, each with a download icon and a filename starting with 'backup.2019-04-'. The files are listed from April 13th to May 25th, 2019. At the top right of the main area, there are two buttons: 'Backup erstellen' (Create Backup) and 'Restore durchführen' (Perform Restore). The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 23:25 on 27.05.2019.



## Zusatztexte für Sektorenverwaltung:

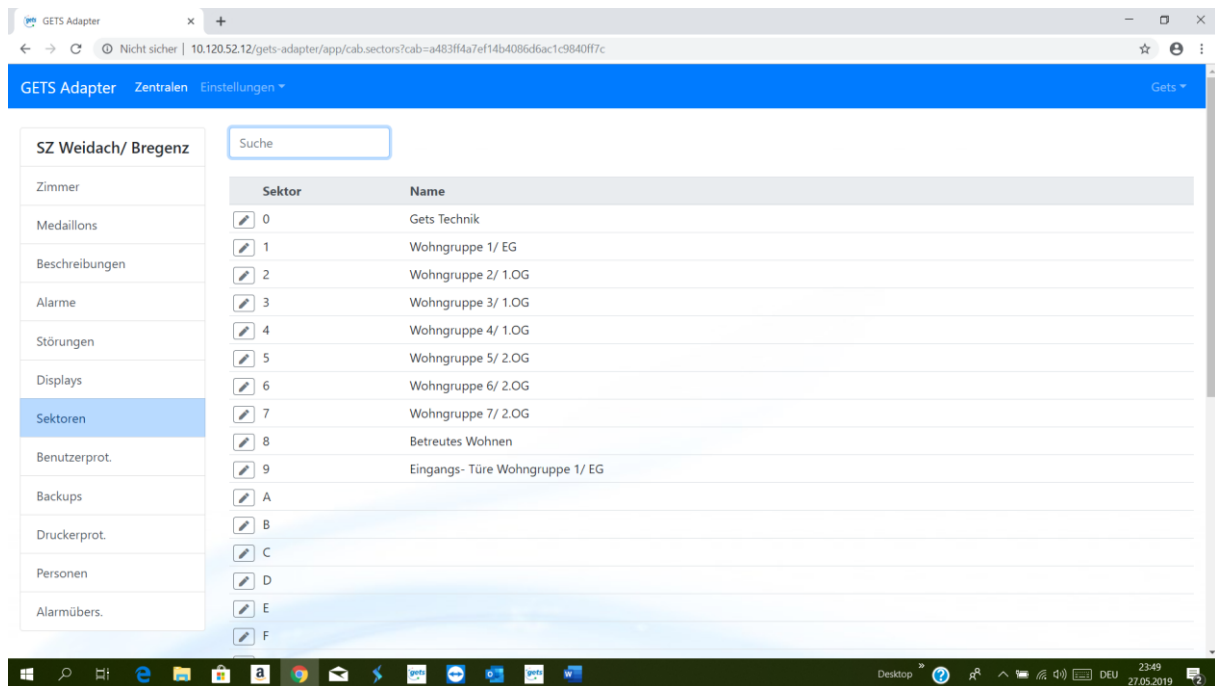


GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Suche

Sektor	Name
0	Gets Technik
1	Wohngruppe 1/ EG
2	Wohngruppe 2/ 1.OG
3	Wohngruppe 3/ 1.OG
4	Wohngruppe 4/ 1.OG
5	Wohngruppe 5/ 2.OG
6	Wohngruppe 6/ 2.OG
7	Wohngruppe 7/ 2.OG
8	Betreutes Wohnen
9	Eingangs- Türe Wohngruppe 1/ EG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

## Protokollierung Benutzerprotokoll:

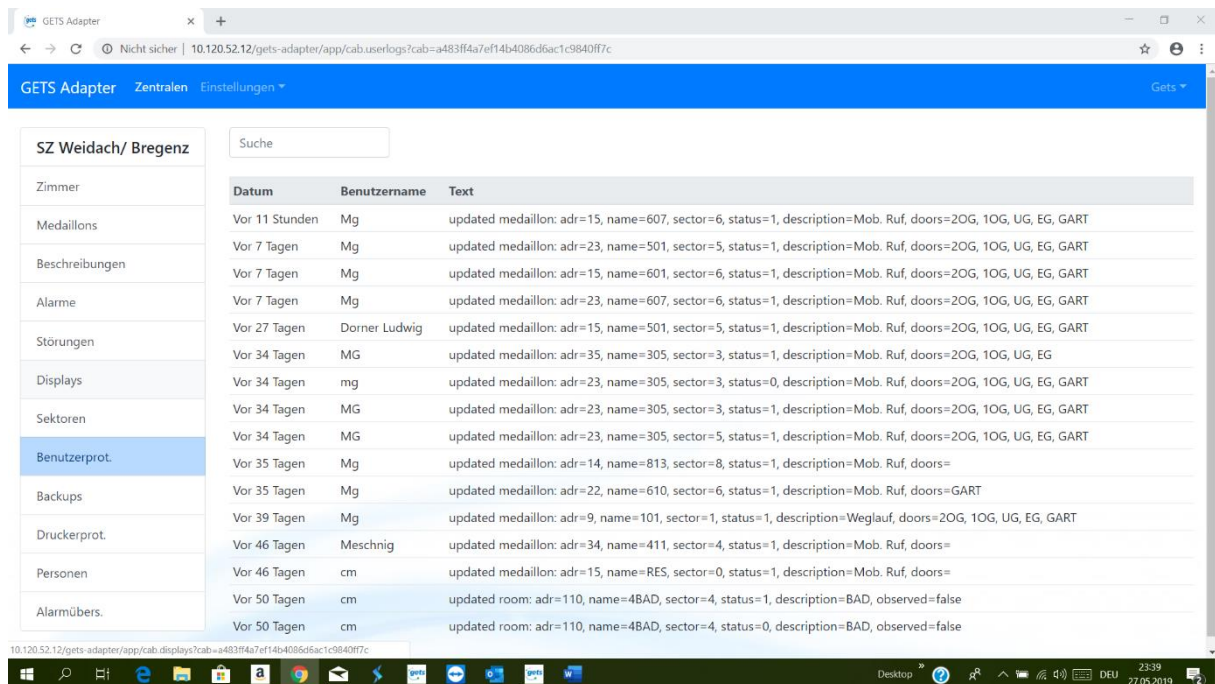


GETS Adapter Zentralen Einstellungen

Suche

Datum	Benutzername	Text
Vor 11 Stunden	Mg	updated medaillon: adr=15, name=607, sector=6, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 7 Tagen	Mg	updated medaillon: adr=23, name=501, sector=5, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 7 Tagen	Mg	updated medaillon: adr=15, name=601, sector=6, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 7 Tagen	Mg	updated medaillon: adr=23, name=607, sector=6, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 27 Tagen	Dorner Ludwig	updated medaillon: adr=15, name=501, sector=5, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 34 Tagen	MG	updated medaillon: adr=35, name=305, sector=3, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG
Vor 34 Tagen	mg	updated medaillon: adr=23, name=305, sector=3, status=0, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 34 Tagen	MG	updated medaillon: adr=23, name=305, sector=3, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 34 Tagen	MG	updated medaillon: adr=23, name=305, sector=5, status=1, description=Mob. Ruf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 35 Tagen	Mg	updated medaillon: adr=14, name=813, sector=8, status=1, description=Mob. Ruf, doors=
Vor 35 Tagen	Mg	updated medaillon: adr=22, name=610, sector=6, status=1, description=Mob. Ruf, doors=GART
Vor 39 Tagen	Mg	updated medaillon: adr=9, name=101, sector=1, status=1, description=Weglauf, doors=2OG, 1OG, UG, EG, GART
Vor 46 Tagen	Meschnig	updated medaillon: adr=34, name=411, sector=4, status=1, description=Mob. Ruf, doors=
Vor 46 Tagen	cm	updated medaillon: adr=15, name=RES, sector=0, status=1, description=Mob. Ruf, doors=
Vor 50 Tagen	cm	updated room: adr=110, name=4BAD, sector=4, status=1, description=BAD, observed=false
Vor 50 Tagen	cm	updated room: adr=110, name=4BAD, sector=4, status=0, description=BAD, observed=false




## Verwaltung Erstellen von verschiedenen Benutzerprofilen:

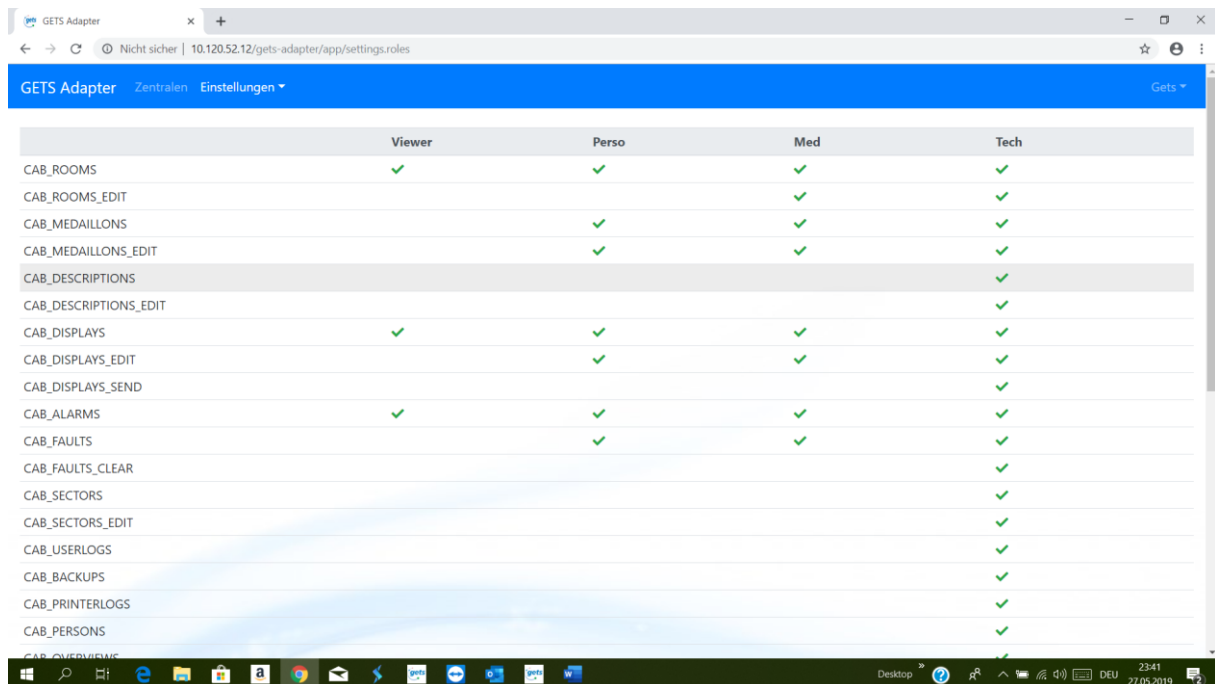

	Viewer	Perso	Med	Tech
CAB_ROOMS	✓	✓	✓	✓
CAB_ROOMS_EDIT			✓	✓
CAB_MEDAILLONS		✓	✓	✓
CAB_MEDAILLONS_EDIT		✓	✓	✓
CAB_DESCRIPTIONS				✓
CAB_DESCRIPTIONS_EDIT				✓
CAB_DISPLAYS	✓	✓	✓	✓
CAB_DISPLAYS_EDIT		✓	✓	✓
CAB_DISPLAYS_SEND				✓
CAB_ALARMS	✓	✓	✓	✓
CAB_FAULTS		✓	✓	✓
CAB_FAULTS_CLEAR				✓
CAB_SECTORS				✓
CAB_SECTORS_EDIT				✓
CAB_USERLOGS				✓
CAB_BACKUPS				✓
CAB_PRINTERLOGS				✓
CAB_PERSONS				✓

## Menu Verwaltung Einstellungen:

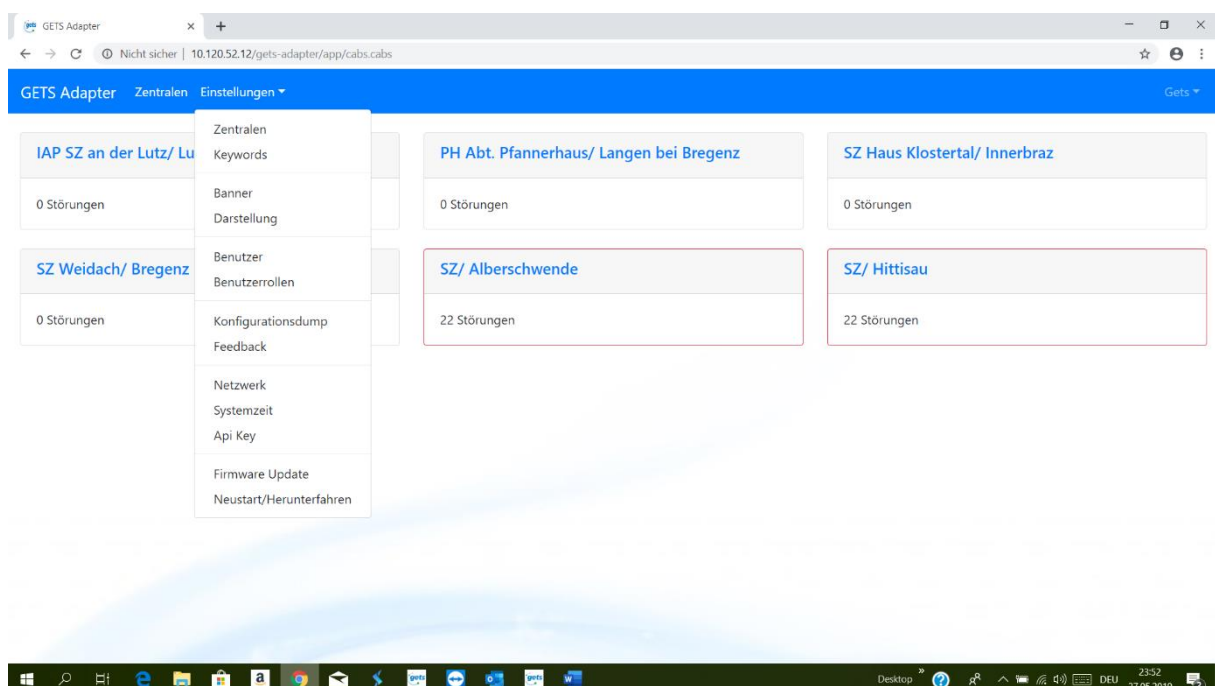

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) menu in the GETS Adapter interface. The menu is open, displaying a list of settings categories. The main content area shows a grid of settings cards for different locations, each with a status indicator (e.g., '0 Störungen' or '22 Störungen').


**Menu Items:**

- Zentralen
- Keywords
- Banner
- Darstellung
- Benutzer
- Benutzerrollen
- Konfigurationsdump
- Feedback
- Netzwerk
- Systemzeit
- Api Key
- Firmware Update
- Neustart/Herunterfahren

**Settings Cards:**

- IAP SZ an der Lutz/ Lu**: 0 Störungen
- SZ Weidach/ Bregenz**: 0 Störungen
- PH Abt. Pfannerhaus/ Langen bei Bregenz**: 0 Störungen
- SZ/ Alberschwende**: 22 Störungen
- SZ Haus Klostersal/ Innerbranz**: 0 Störungen
- SZ/ Hittisau**: 22 Störungen

## Vsualisierung Alarmanzeigeigepanel pro Interface:

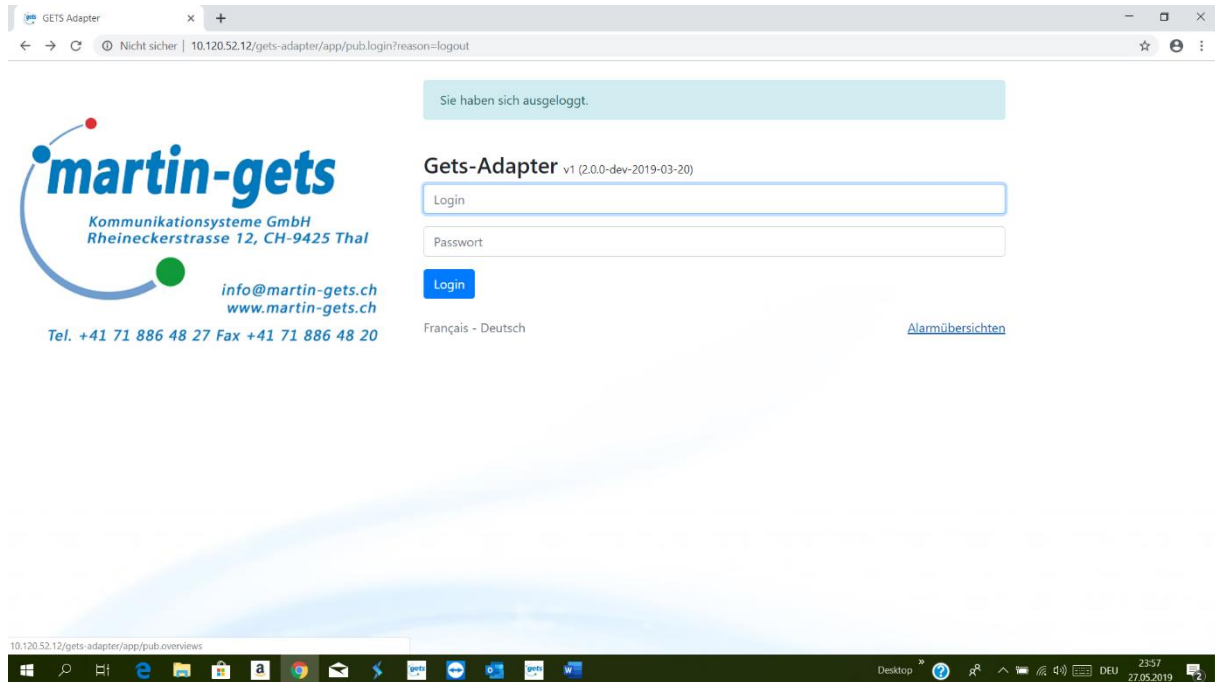

GETS Adapter

Nicht sicher | 10.120.52.12/gets-adapter/app/pub.login?reason=logout

Sie haben sich ausgeloggt.

**Gets-Adapter** v1 (2.0.0-dev-2019-03-20)

Login


Passwort

Login

Français - Deutsch

[Alarmübersichten](#)

**martin-gets**  
Kommunikationssysteme GmbH  
Rheineckerstrasse 12, CH-9425 Thal  
info@martin-gets.ch  
www.martin-gets.ch  
Tel. +41 71 886 48 27 Fax +41 71 886 48 20

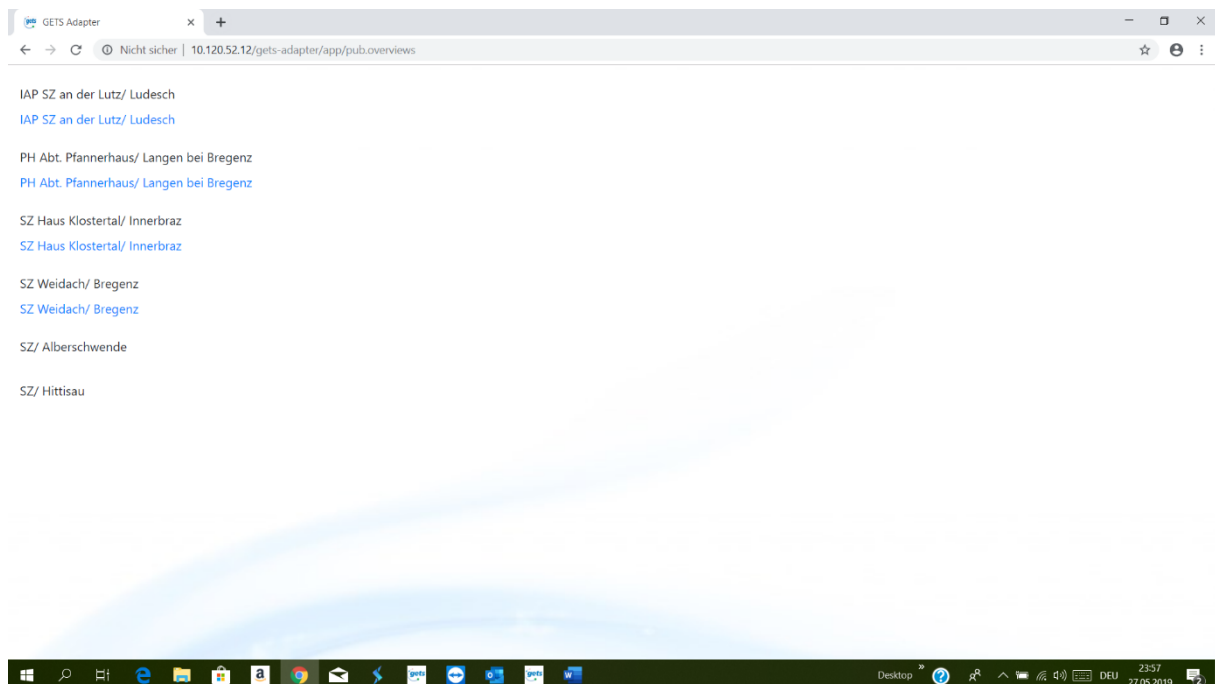

GETS Adapter

Nicht sicher | 10.120.52.12/gets-adapter/app/pub.overviews

IAP SZ an der Lutz/ Ludesch  
[IAP SZ an der Lutz/ Ludesch](#)

PH Abt. Pfannerhaus/ Langen bei Bregenz  
[PH Abt. Pfannerhaus/ Langen bei Bregenz](#)

SZ Haus Klostertal/ Innerbraz  
[SZ Haus Klostertal/ Innerbraz](#)

SZ Weidach/ Bregenz  
[SZ Weidach/ Bregenz](#)

SZ/ Alberschwende

SZ/ Hittisau

GETS Adapter x +

Nicht sicher | 10.120.52.12/gets-adapter/app/pub.overview?cab=a483ff4a7ef14b4086d6ac1c9840ff7c&overview=98d0f8fe126d43b79594bf26dd4a7ee9

27.05.2019 23:56 SZ Weidach/ Bregenz

27.05.2019 23:51 306/----  
Normalruf

27.05.2019 17:13 1WC/----  
Anwesenheit

Desktop 23:56 27.05.2019

GETS Adapter x +

Nicht sicher | 10.120.52.12/gets-adapter/app/pub.overview?cab=47ac668757ff431d8cb2cf3ab6470440&overview=305f5e931a25421b84e46955543687de

27.05.2019 23:58 SZ Haus Klostertal/ Innerbraz

25.05.2019 14:13 1DZ/\*---  
Stoerung

Desktop 23:58 27.05.2019