


Einleitung

SecuCare bietet eine komfortable Möglichkeit, die GETS Wireless Komponenten über eine intuitive Weboberfläche zu verwalten.

Die aktuelle Versionsnummer finden sie unter dem Menüpunkt *Über*.


Anmeldung

Beim Anklicken eines Menüpunkts, erfolgt, wenn nötig eine Anmeldung.

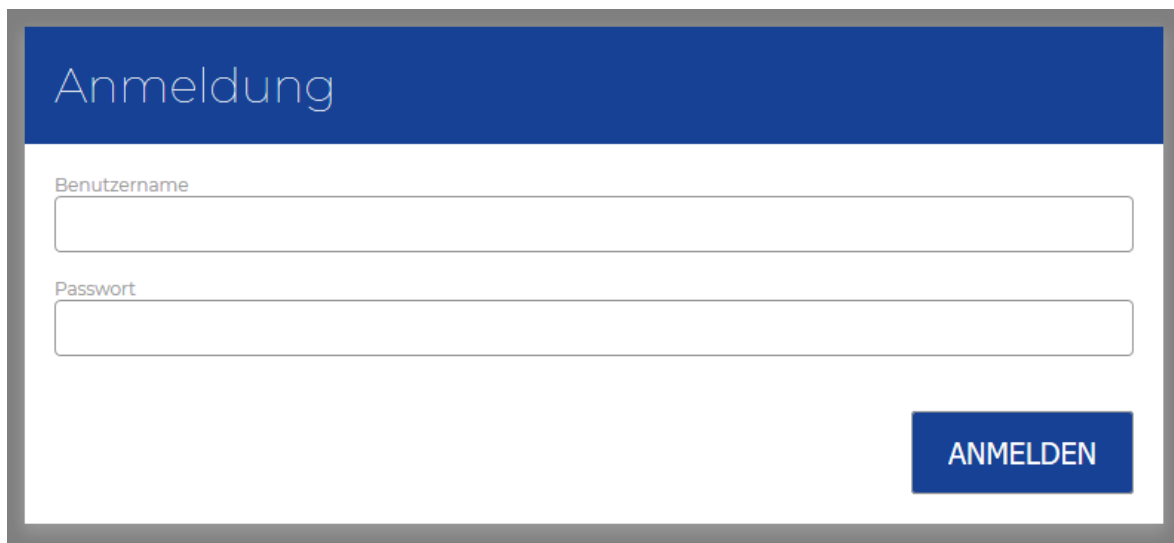

Abmeldung

Um sich abzumelden verwenden Sie den Abmelde Button in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

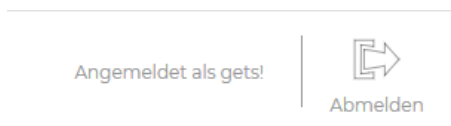

Allgemeine Funktionen

Suchfunktion

Im oberen Bereich der Module ist es möglich nach dem Namen zu suchen und so die Liste der Komponenten zu filtern. Neben der Suche nach Namen ist es auch möglich nach Seriennummern zu suchen. Die Eingabe der Bindestriche ist hierzu nicht zwingend erforderlich. Auch ist es in vielen Fällen ausreichend, die letzten Stellen der Seriennummer einzugeben.

Batteriestatus

Zu allen Funkdevices, von denen der Batteriestatus ermittelt werden kann, wird dieser angezeigt. Der Batteriestatus wird von den Funkdevices zyklisch gemeldet. Wird kein Batterissymbol angezeigt, ist vom Device noch kein Status gemeldet worden.

Modulbeschreibungen

Im oberen Bereich des Fensters befindet sich die Navigationsleiste. Mit Hilfe dieser können die nachfolgend beschriebenen Module ausgewählt werden.

Zimmer

Der Menüpunkt *Zimmer* zeigt alle im Alarmserver konfigurierten Zimmer an. Ist eine Verbindung zum GETS Hub - oder dem vom MAS zur Verfügung gestellten Proxy - vorhanden, so werden zusätzlich verfügbare Informationen angezeigt. Dies ist z.B.: der Batteriezustand der einzelnen Medaillons.


Armbänder / Medaillons


Der Menüpunkt Armbänder zeigt alle aktuell im Alarmserver konfigurierten Armbänder an. Ist eine Verbindung zum GETS Hub - oder dem vom MAS zur Verfügung gestellten Proxy - vorhanden, so werden zusätzlich verfügbare Informationen angezeigt. Dies ist z.B.: der Batteriezustand der einzelnen Medaillons.

Achtung der Batteriezustand wird nicht zyklisch aktualisiert.
Erst ca. 1 Stunde nach dem Einschalten des Funkhubs sind valide Spannungswerte verfügbar.

Zum Editieren eines Medaillons klicken Sie auf den Button *Bearbeiten* rechts neben dem Namen.

Konfigurierte medaillons

 Suchbegriff eingeben, um die Liste zu filtern

 Jan Busch

 Manuela Peters

Im Bearbeiten Dialog des Medaillons, kann über einen Schalter die Patientenruffunktion für das ausgewählte Medaillon aktiviert bzw. deaktiviert werden. Weiter ist es möglich fest zu legen, an welchen Positionsgeneratoren ein Alarm ausgelöst werden soll.

Name	
Zi. 08 / Karl Schmid	
Gruppe	Zimmer
Station 1	MED14
Seriennummer	
11-22-33-44	
Patientenruf Aus <input checked="" type="checkbox"/> An	
Alarm Positionen	
Eingang Nord x Eingang Sued x x v	
ABBRECHEN ÜBERNEHMEN	

Bodenmatten

Der Menüpunkt Bodenmatten zeigt alle im Alarmserver konfigurierten Bodenmatten (alternativ können hier auch andere Funkauslöser verwaltet werden). Ist eine Verbindung zu GETS Hub - oder dem vom MAS zur Verfügung gestellten Proxy - vorhanden, so werden zusätzlich verfügbare Informationen angezeigt. Dies ist z.B.: der Batteriezustand der einzelnen Medaillons.

Positionen

Um dem Alarmserver die Möglichkeit zu geben, die Positionen in Text aufzulösen und so sprechende Namen für die Positionsnummern in den Alarmnachrichten zu versenden, kann unter diesem Menüpunkt die Liste der Positionen verwaltet werden. Der Code entspricht dem am Positionsgenerator über die Miniaturschalter eingestellten Code. Der Positionsname ist ein Freitextfeld. Um Darstellungsprobleme zu vermeiden, ist darauf zu achten, die Texte kurz zu halten.

Hilfe

Auf der Seite Hilfe befindet sich die aktuelle SecuCare Dokumentation.

Über

Auf der Seite *Über* werden Informationen zur Lizenz sowie der installierten Software angezeigt. Lizenz- bzw. Updatedateien können zur Installation per Drag & Drop auf den markierten Bereich gezogen werden.

Lizenz

Lizensiert für: ONLY-FOR-TESTING

Partner: Securaxx Medical Care GmbH

Device ID: 0000000000000000

Lizenz-Details: 2/2/2/2

Max Version: 9.9.9

Sollten sie noch Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen telefonisch unter [+49 \(0\)89 91 92 91 450](tel:+49(0)89919291450) zur Verfügung. Unser E-Mail-Support ist unter support@securaxx.de für sie erreichbar.

Um Ihre Lizenz zu aktualisieren legen Sie ihr Lizenzfile per Drag&Drop in diesem Bereich ab oder klicken Sie zum auswählen einer Lizenzdatei.

Version

Front-End-Version: 0.11.3-dirty

Back-End-Version: 0.12.0-DEV

Sie verwenden eine Entwickler-Version (0.12.0-DEV). Bitte seien Sie vorsichtig!